

# Dermagiq® Skin

## Product

Dermagiq® Skin

30 g / 50 g crème voor wondbehandeling bij eczeem en andere huidaandoeningen

## Ingrediënten

Arachis oleum, cera alba, glyceryl oleate, mel, aqua, rosa oleum.

## Productbeschrijving

Dermagiq® Skin is een goed smeerbare crème voor de behandeling van oppervlakkige (open) wondjes bij eczeem en andere huidaandoeningen (o.a. roodheid, jeuk, bij een insectenbeet). Dermagiq® Skin bevat een huidverzorgende basiscrème in combinatie met zuivere honing en kan op grote huidoppervlakken worden toegepast. De honing in Dermagiq® Skin heeft een hoog gehalte aan honingenzymen, o.a. glucose oxidase. In een vochtig milieu produceert het enzym glucose oxidase kleine hoeveelheden waterstofperoxide. Door de hoge suikerconcentratie van de honing mengt een deel van het vocht uit wondjes met Dermagiq® Skin en vormt zo een beschermend laagje dat antibacteriële bescherming biedt. Dermagiq® Skin bevat geen residuen van bestrijdingsmiddelen of conserveringsmiddelen.

## Wijze van toepassing

1. Schroef het witte dopje van de tube.
2. Draai het dopje om.
3. Open de tube door de punt van het dopje door de tubeopening te drukken.
4. Een laagje Dermagiq® Skin aanbrengen op de te behandelen plaats.
5. Dermagiq® Skin licht inmasseren.
6. Dermagiq® Skin 10 minuten in laten trekken.
7. Indien mogelijk volledig afdekken met een secundair wondverband.
8. De aangedane plaats 1 tot 3 maal per dag behandelen.

## Indicaties

Dermagiq® Skin kan worden toegepast op oppervlakkige en open wonden bij o.a. eczeem. Dermagiq® Skin kan ook worden toegepast bij huidirritaties, roodheid, jeuk en bescherming van intacte, droge of beschadigde huid. Dermagiq® Skin is geschikt voor alle leeftijden.

## Contra indicaties

Gebruik dit product niet indien bekend is dat de patiënt allergisch of overgevoelig is voor een van de ingrediënten. Een allergische reactie of overgevoeligheid kan roodheid, irritatie en mogelijk lichte pijn van de huid of wond veroorzaken.

## Bijwerkingen

- In de eerste minuten na het aanbrengen kan het product een licht prikkend gevoel veroorzaken. Het prikkende gevoel wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de lage pH-waarde en de hoge osmolariteit van de honing. Het is niet van invloed op de werking van het product.
- Mochten zich na gebruik onverwachte bijwerkingen voordoen, neem dan contact op met uw arts of de fabrikant. Bijwerkingen kunnen ongemak voor de patiënt veroorzaken.

## Voorzorgsmaatregelen

- Niet gebruiken indien de tube beschadigd is. Hierdoor kan het product namelijk verontreinigd raken met bacteriën, wat kan leiden tot wondinfectie. Vanwege de antibacteriële bescherming van honing wordt de kans op wondinfectie zeer gering geacht.
- Plaats na gebruik altijd de dop terug op de tube. Een open tube kan leiden tot verontreiniging met bacteriën en wondinfectie. Vanwege de antibacteriële bescherming van honing wordt de kans op wondinfectie zeer gering geacht.
- Laat de tube niet in direct contact komen met het wondoppervlak. Direct contact tussen de wond/- huid en de (geopende) tube kan leiden tot verontreiniging met bacteriën en wondinfectie. Vanwege de antibacteriële bescherming van honing wordt de kans op wondinfectie zeer gering geacht.
- Dit product niet langer dan 30 dagen achtereen aanbrengen. Behandeling gedurende meer dan 30 dagen achtereen kan leiden tot ongemak voor de patiënt, zoals irritatie en/of lichte pijn.
- Gebruik de inhoud binnen 3 maanden na openen van de tube. Langer gebruik kan leiden tot een minder goede werking en verontreiniging van het product. Vanwege de antibacteriële bescherming van honing wordt de kans op wondinfectie zeer gering geacht.
- Verschillende patiënten niet met dezelfde tube behandelen. Dit kan namelijk leiden tot kruisverontreiniging met bacteriën en wondinfectie. Vanwege de antibacteriële bescherming van honing wordt de kans op wondinfectie zeer gering geacht.
- Gebruik het product niet na de uiterste gebruiksdatum. Dit kan namelijk leiden tot een minder goede werking van het product en ongemak voor de patiënt.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen om de tube te openen. Dit kan leidentot het loskomen van stukjes van het afsluitmembraan en tot ongemak bij het gebruik.

## Bewaarcondities

Bewaren tussen 4 °C en 30 °C.